

スキャンスプレー SCANTIST 3D

スキャン後、時間を置くとコーティングが自然に消える、画期的なスキャンスプレーです。

酸化チタン等の白色顔料不使用。飛び散らないため外で作業する必要はありません。
専用ノズルで均一に薄くスプレーでき、被膜は約2 μ mで補綴物の適合も良好です。




専用のノズル付きなので、非常に薄く均一なコーティングが可能で高精度なスキャンが実現できます。

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)
商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

コーティングは揮発するため被膜が残りません。

※完全に揮発するまで約30分~4時間かかります。(素材により揮発時間が異なります。)
※作業中は換気を行ってください。
※10cm以上離してスプレーしてください。

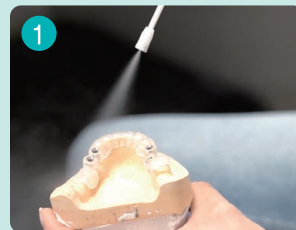

10cmほど離してスプレー噴射



均一にスプレーした状態



スキャンニング中



数時間後、完全に消えます

スキャンスプレー SCANTIST 3Dの動画をぜひご覧ください。コーティングが自然に消えていく様子を詳しく確認していただけます。



スキャンスプレー SCANTIST 3D

商品コード	内容量	入数	価格
FC-0511	200ml	1本	5,000円

販売名：スキャンスプレー SCANTIST 3D 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00113

担当販売店