

premiumTM
plus JAPAN

アクアスプリント サーモ

Aquasplint Thermo

約10分のチェアタイムで完成。当日お渡し可能な顎関節症疼痛緩和用スプリントです。熱可塑サーマルパッドを患者様の下顎に圧接してフィットさせます。手軽に個人スプリントが完成します。コネクションチューブで繋がったウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



使用時イメージ

- 矯正装置を装着しながらでも使用可能（保護ワックス要）。
- 患者様ごとに簡単にカスタマイズ可能。

アクアスプリント考案者：Dr.Sabbagh,Germany (ドイツ矯正歯学会バイエルン支部会長)
"アメリカ矯正歯学会 in Chicago 2011"にてアクアスプリントの臨床結果が発表されています。詳細はお問合わせください。

使用方法



1 80℃のお湯に2～3分浸漬しサーマルパッドが透明になるのを待つ。



2 透明になったサーマルパッドを冷水で10秒間冷却する。



3 下顎に圧接し5分間保持する。冷水で口腔内をすすぎ、口腔内を冷却する。



4 サーマルパッドが白くなり凝固したことを確認し撤去する。(1～5は繰り返し行うことができます。)



5 サーマルパッドの余剰部分はハサミ等で除去する。

・装着時間1日10時間以内(就寝時8時間、日中2時間) ・4週間使用しても症状改善が見られない場合は咬合以外の疼痛原因を検討する。



● セット内容

- ・スプリント台
- ・リテーナーボックス×1
- ・取扱説明書

アクアスプリント サーモ

Aquasplint Thermo

商品コード	入数	価格
AQ2	1セット	14,000円

販売名：アクアスプリント サーモ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00107

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店