


新商品 / アクアスプリントサーモ



約10分のチェアタイムで完成！
その日のうちにお渡しできる
顎関節症疼痛緩和用スプリント。

アメリカ矯正歯科学会 in Chicago 2011
にてアクアスプリントの臨床結果が発表されています。
詳細はお問合わせください。

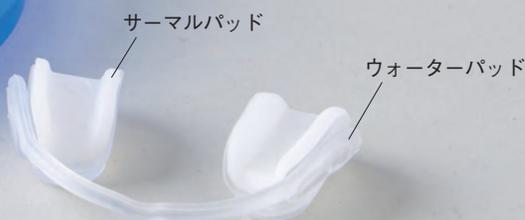

熱可塑サーマルパッドを患者様の下顎に
圧接してフィットさせます。

口腔内に挿入すると左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。

使用方法



80°Cのお湯に2~3分浸漬し
サーマルパッドが透明になる
のを待つ。



透明になったサーマルパッドを
冷水で10秒間冷却する。



下顎に圧接し5分間保持する。
冷水で口腔内をすすぎ、口腔内
を冷却する。



サーマルパッドが白くなり凝固し
たことを確認し撤去する。(1~5
は繰り返し行うことができます。



サーマルパッドの余剰部分は
ハサミ等で除去する。

・装着時間1日10時間以内(就寝時8時間、日中2時間) ・4週間使用しても症状改善が見られない場合は咬合以外の疼痛原因を検討する。



セット内容

- ・スプリント台
- ・リテーナーボックス×1
- ・取扱説明書×1



詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→咬合→アクアスプリントサーモ

商品ページからチラシPDFもご覧いただけます。
A4サイズチラシもご用意しておりますので、お問い合わせください。





お使いのバキュームに接続。
ミラーヘッドから吸引する
バキュームミラー。



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

反射率
99%

防曇
加工

● 一人診療時

バキュームのアシスタントがない場合でも一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時

常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に

タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。

バキュームミラー用チューブ(別売)



360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。

反射率99% 表面反射



バキュームミラー



ロジウムコーティング表面反射ミラー

反射率99%の表面反射ミラー。
ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

<当社比較>

CM24J399 3本カラーアソート(No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)

CM2-12 バキュームミラー用チューブ

307 アダプター /10mm



変換アダプター (16→11mm)

360°回転アダプター

ミラーホルダー

バキュームミラー用チューブ

3本カラーアソート

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→インストゥルメント→バキュームミラー



商品ページからチラシPDFもご覧いただけます。
A4サイズチラシもご用意しておりますので、お問い合わせください。

接続方法と吸引力を動画でもご覧いただけます。
(動画は商品ページ、TOPページバナーにもございます)

