

キュアリングライトに装着可能なライナー矯正用のEZアタッチメント

圧接することで余剰レジンバリが減り、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。

アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。



照射エリアを集中させ硬化範囲を制限させます。

**EZアタッチメント** ディスポーザブル 滅菌済

※スリーブの上から装着ください。

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50	φ10×H10mm	ネイビー	50個	13,500円
C02-PEZA-10			10個	3,000円

対応機種 NEWキュアリングライトC02-C(クラシック)、NEWキュアリングライトC02-D(デュアル)、NEWキュアリングライトC01-D(デュアル)、キュアリングライトC02(販売終了)、キュアリングライトミニC02

C02-C(クラシック)  
C02-D(デュアル)  
C02-M(ミニ)



補助不要のアタッチメント接着  
QRコードを読み込むと動画をご覧いただけます。

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット

NEWキュアリングライトC02 EZアタッチメントスターターキット

商品コード <b>FL-0102</b> セット価格 <b>60,000円</b> 1セット (EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-C) 販売名: キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268000049	商品コード <b>FL-0103</b> セット価格 <b>90,000円</b> 1セット (EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-D) 販売名: キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268000050	商品コード <b>FL-0104</b> セット価格 <b>51,000円</b> 1セット (EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトミニC02) 販売名: キュアリングライトミニC02 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00268000058
---	---	---



セット内容

- ・EZアタッチメント×50
  - ・キュアリングライトC02-CまたはC02-DまたはミニC02
  - ・キュアリングライトプロテクティブ ライトシールド×1
  - ・125口径内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C02-CまたはC02-D)
  - ・228口径ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (ミニC02)
  - ・NEW 熱保護リング ・バッテリー ・充電スタンド ・ACアダプター (C02-CまたはC02-D)
  - ・USBケーブル (ミニC02) ・取扱説明書 ・保証書
- ※EZアタッチメントはスリーブの上から装着ください。

NEWキュアリングライト  
交換用バッテリー

商品コード **C01/2-1**

価格: **8,000円**

- 種類: リチウムイオン
- 入数: 1本

カラーは10色からお選びいただけます。

バッテリーはC01-C/D、C02-C/D、ミニC02-C/D各種共通となります

カラーは10色からお選びいただけます。

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム
- ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F  
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5  
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0702006-03

premium<sup>TM</sup> plus JAPAN

CURING  
LIGHT  
MINI  
01,02

NEW  
CURING  
LIGHT  
C01-C

NEW  
CURING  
LIGHT  
C02-C

NEW  
CURING  
LIGHT  
C01-D

NEW  
CURING  
LIGHT  
C02-D

# CURING LIGHT MINI

MINI  
軽量  
80g台

従来の使いやすさはそのまま、  
今までにない軽量の  
キュアリングライトです。

波長域は440~480nm、  
軽量なので使用者の負担も軽減します。

キュアリングライトC01、C02から小型軽量化を実現したキュアリングライトミニが新登場！

従来のキュアリングライトから約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

## 照射モード

モード	モード説明	照射光量	照射時間(秒)
FULL	光量 1,200mW/ cm <sup>2</sup> のモードです。	1,200mW/ cm <sup>2</sup>	5,10,15,20,25,30
SOFT	5秒間で900mW/ cm <sup>2</sup> まで上昇し、その後は900mW/ cm <sup>2</sup> で照射する。	900mW/ cm <sup>2</sup>	5,10,15,20,25,30

※3秒間ボタンを長押しすると「ビピッ」と音が鳴るので、その後ボタンを押してモードを選択します。  
使用したいモードにランプが点いていることを確認し、3秒放置すると「ビピッ」と鳴りモードが固定されます。

## 充電コード

充電コードは汎用性の高い  
USBケーブルCタイプを使用。  
充電は置くだけ充電。  
※ACアダプターは付属していません。



## サイズ比較

従来のクラシック、デュアルと比べ、  
約60%の小型軽量化に成功。

キュアリングライトC01に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品から約60%小型軽量化し、使用者の負担も軽減しました。

SELECT  
1年保証



### 仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×230mm
- 本体重さ：84g
- ライトガイド：φ8mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重さ：53g
- 自動電源 OFF 機能：60秒

### セット内容

- ・ライトガイド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBケーブル Cタイプ (1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド ×1
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは10色から  
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック

## キュアリングライト C01 ミニ

商品コード **C01-M** セット価格 36,000円

- 本体サイズ：φ17×230mm
  - ライトガイド：φ8mm
  - 入数：1セット
- 販売名：キュアリングライト ミニ C01 一般医療機器 特定保守管理医療機器  
届出番号：27B2X00268000057

## キュアリングライトC01ミニ ライトガイド

商品コード **C01-M-1** 価格:10,000円

- サイズ：φ8mm
- 入数：1本

キュアリングライトC02に、小型化を実現した新ラインナップが登場！

従来の製品からヘッドが1mm薄くなり、さらに約60%小型軽量化しました。

SELECT  
1年保証



### 仕様

- 電源：入力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×220mm
- 本体重さ：83g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重さ：53g
- 自動電源 OFF 機能：60秒

### セット内容

- ・ライトヘッド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBケーブル Cタイプ (1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ ×100
- ・キュアリングライト プロテクティブライトシールド ×1
- ・NEW 熱保護リング ×6
- ・取扱説明書
- ・保証書

カラーは10色から  
お選びいただけます

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン
- ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー
- ホワイト ●ブラック

## キュアリングライト C02 ミニ

商品コード **C02-M** セット価格 42,000円

- 本体サイズ：φ17×220mm
  - ライトヘッド：φ10mm
  - 入数：1セット
- 販売名：キュアリングライト ミニ C02 一般医療機器 特定保守管理医療機器  
届出番号：27B2X00268000058

## キュアリングライトC02ミニ ライトヘッド

商品コード **C02-M-1** 価格:12,000円

- サイズ：φ10mm
- 入数：1本

## キュアリングライトミニ 交換用バッテリー

商品コード **C01/2-M-1** 価格:8,000円

- 入数：1本
  - 種類：リチウムイオン
- ※C01-M/C02-M共通となります。

## ペン型キュアリングライトスリーブ ミニ

商品コード **228** 価格:4,000円

- サイズ：38×250mm
  - 入数：500枚
- ※C01-M/C02-M共通となります。

**C01** 従来の使いやすさはそのままに、4秒照射を実現！  
 2タイプの展開で、C01-D(デュアル)は青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

口腔内にスムーズに挿入でき、  
 特に舌側面への照射に適しています




NEW  
 CURING  
 LIGHT

クラシック

# C01-C

波長範囲：440-480nm  
 光量：1,500mW/cm<sup>2</sup>  
 モード：4種類

5 TURBOモードで  
 秒照射!!

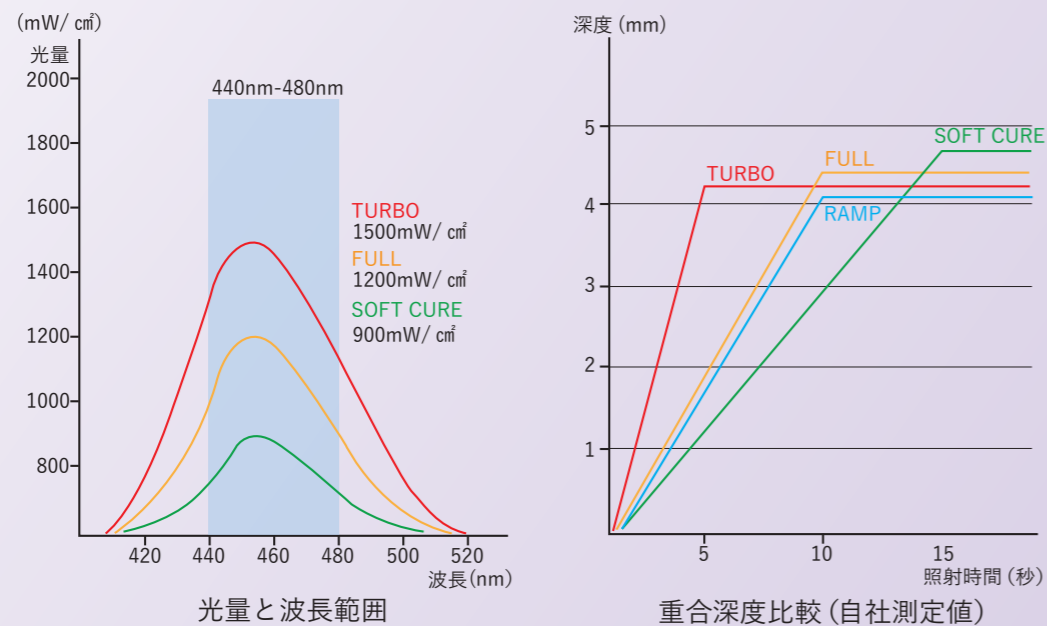


NEW  
 CURING  
 LIGHT

デュアル

# C01-D

波長範囲：390-430/440-480nm  
 光量：2,000mW/cm<sup>2</sup>  
 モード：7種類

4 TURBOモードで  
 秒照射!!

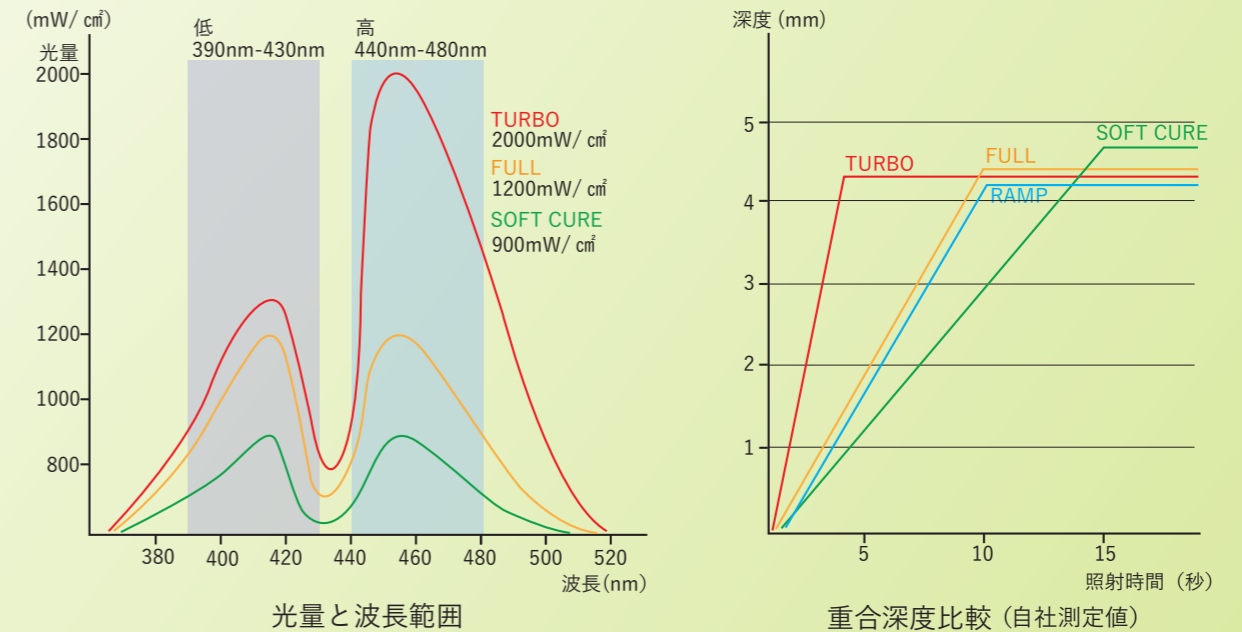

**C02** より薄く進化したライトヘッドが、臼歯部への照射をサポートします!

C02-D(デュアル)は3秒照射に加え、青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

90°の照射角度は少ない開口で遠心部への照射が可能です。



NEW  
CURING  
LIGHT

クラシック

# C02-C

波長範囲：440-480nm  
光量：1,500mW/cm<sup>2</sup>  
モード：4種類

5 TURBOモードで  
秒照射!!



NEW  
CURING  
LIGHT

デュアル

# C02-D

波長範囲：390-430/440-480nm  
光量：2,500mW/cm<sup>2</sup>  
モード：7種類

3 TURBOモードで  
秒照射!!

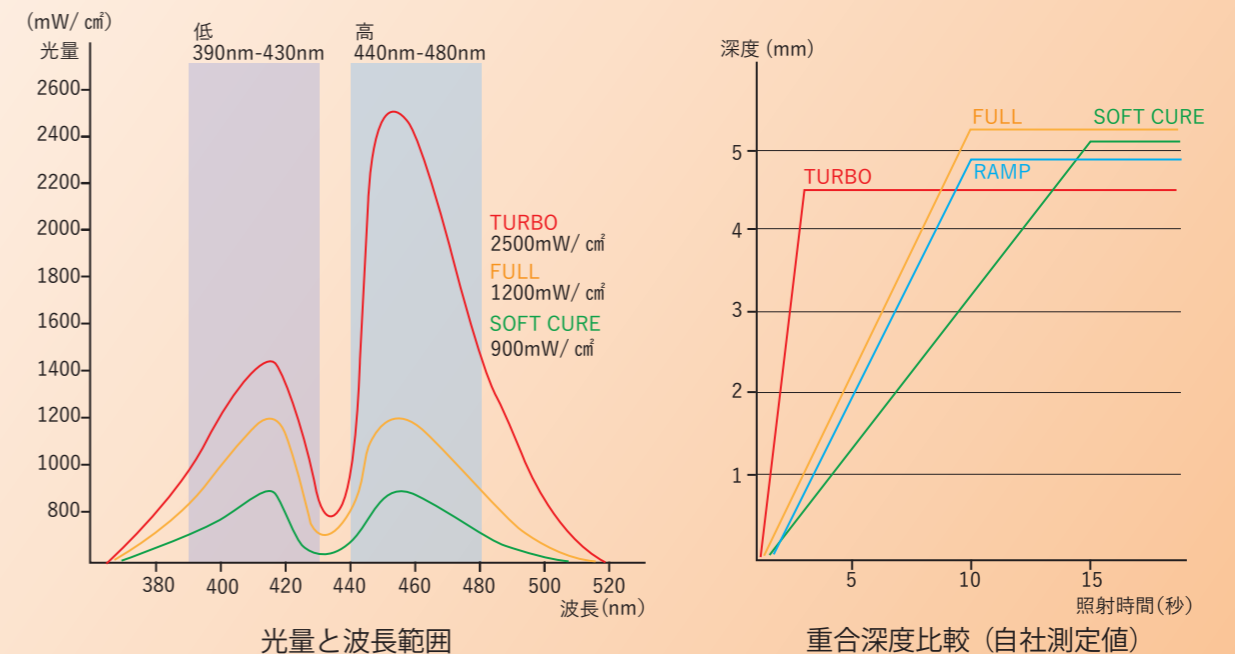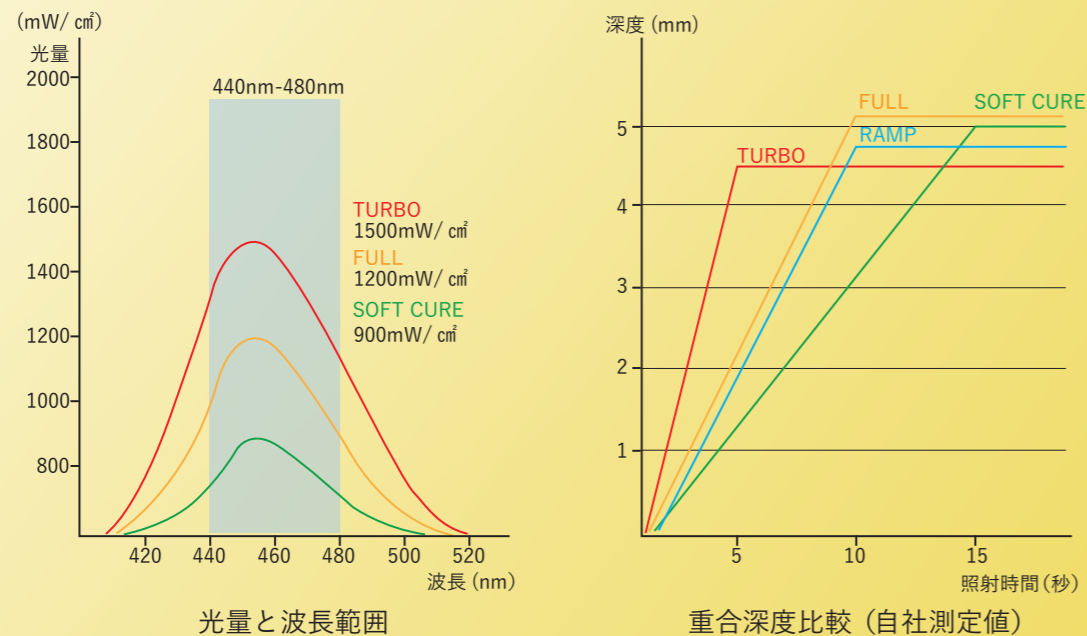


最もスタンダードなクラシック、  
デュアルレンジを要する  
ハイパワーモデルのデュアル。



### 360°回転可能

ヘッドを回転させることで、  
上歯・下歯共に容易に照射できます。

# C01

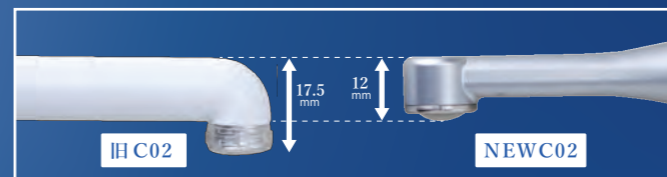

ライトヘッドの厚みが約30%薄くなりました(当社比)。  
NEWC02は、光が拡散しにくい設計になっています。

# C02




### 360°回転可能

ヘッドを回転させることで、  
上歯・下歯共に容易に照射できます。

- ☑ 自社設計・自社工場での徹底した品質管理を行っております
- ☑ 咬合面・舌側面に適した照射角度と、光量は最大2,500mW/cm<sup>2</sup>のLED光重合器
- ☑ 10色展開のカラーバリエーションで簡単操作、持ち運びにも優れています
- ☑ バッテリー交換が簡単にできます

照射時間モード 照射時間切替は「TIME」ボタンを0.5秒押します。

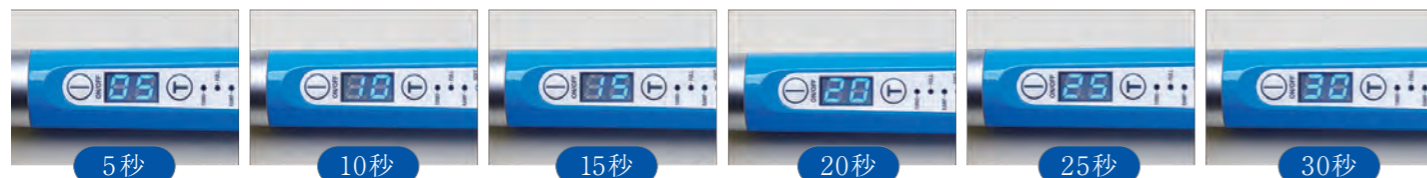

照射モード モード切替は「MODE」ボタンを0.5秒押します。

名称	モード設定
TACK (デュアルのみ)	仮照射に使用できます。 接着性レジンセメントなどの余剰セメント除去に便利です。
TURBO	最も速く硬化させることができるモードです。 光量は C02-D(2,500mW/cm <sup>2</sup> (3秒)), C01-D(2,000mW/cm <sup>2</sup> (4秒)), C01-C/C02-C(1,500mW/cm <sup>2</sup> (5秒)) となります。
3'+3' (デュアルのみ)	メタルプラケットの接着に適しています。 近心、遠心それぞれ3秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
6'+6' (デュアルのみ)	メタルプラケットやバカルチューブの接着に適しています。 近心、遠心それぞれ6秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
FULL	光量 1,200mW/cm <sup>2</sup> の照射モードです。
RAMP	5秒間で光量 1,200mW/cm <sup>2</sup> まで上昇し、その後は光量をキープします。
SOFT CURE	5秒間で 900mW/cm <sup>2</sup> まで上昇し、その後は光量をキープします。 熱さに敏感な患者様に適しています。



**簡単測定**  
照射器の光量をいつでも確認できます。  
(表示の数値×100が光量となります)



**簡単充電**  
置くだけで充電可能です。



**簡単交換**  
バッテリーは抜くだけで交換可能です。

		スペック比較					
製品画像							
製品名	C01-M(ミ)	C01-C(クラシック)	C01-D(デュアル)	C02-M(ミ)	C02-C(クラシック)	C02-D(デュアル)	
最大光量	1,200mW/cm <sup>2</sup>	1,500mW/cm <sup>2</sup>	2,000mW/cm <sup>2</sup>	1,200mW/cm <sup>2</sup>	1,500mW/cm <sup>2</sup>	2,500mW/cm <sup>2</sup>	
波長域	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	
モード数	2	4	7	2	4	7	
ヘッド形状							

安心のメーカー1年保証付き



# NEWキュアリングライト クラシック C01-C



# NEWキュアリングライト デュアル C01-D

## NEWキュアリングライトC01クラシック

商品コード **C01-C** セット価格 42,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトガイド：φ8mm ■入数：1セット  
販売名：キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000047

### NEWキュアリングライトC01クラシック ライトガイド

商品コード **C01-C-1** 価格:6,000円 ■サイズ：φ8mm ■入数：1本

## NEWキュアリングライトC01デュアル

商品コード **C01-D** セット価格 72,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトガイド：φ11mm ■入数：1セット  
販売名：キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000048

### NEWキュアリングライトC01デュアル ライトガイド

商品コード **C01-D-1** 価格:15,000円 ■サイズ：φ11mm ■入数：1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック



#### セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・123ペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-C)
- ・123Lペン型キュアリングライトスリーブ×100 (C01-D)
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書

#### 仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×264mm ■本体重さ：206g (C01-C) 203g (C01-D)
- ライトガイド：φ8mm (C01-C) φ11mm (C01-D) ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒

安心のメーカー1年保証付き



# NEWキュアリングライト クラシック C02-C



# NEWキュアリングライト デュアル C02-D

## NEWキュアリングライトC02クラシック

商品コード **C02-C** セット価格 52,000円

■本体サイズ：φ27×257mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット  
販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000049

### NEWキュアリングライトC02クラシック ライトヘッド

商品コード **C02-C-1** 価格:15,000円 ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

## NEWキュアリングライトC02デュアル

商品コード **C02-D** セット価格 82,000円

■本体サイズ：φ27×253mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット  
販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000050

### NEWキュアリングライトC02デュアル ライトヘッド

商品コード **C02-D-1** 価格:25,000円 ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

カラーは10色からお選びいただけます。 ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック



#### セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書・保証書
- ・NEW熱保護リング×6

#### 仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×257mm (C02-C) φ27×253mm (C02-D)
- 本体重さ：187g (C02-C) 174g (C02-D)
- ライトヘッド：φ10mm ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒