

# SOLEBITE<sup>S</sup> series

Vinyl Polysiloxane  
Bite Registration Material

Made in Japan



SOLEBITE<sup>S</sup>  
Extra Hard



SOLEBITE<sup>S</sup>  
Super Fast



SOLEBITE<sup>S</sup>



premium<sup>+</sup>™  
plus JAPAN

# なぜソールバイトSは使いやすいのか

当社バイト材の最大の特長は、操作性の良さとシャープな硬化反応。  
 操作時に影響する押し出しの軽さを維持するために、フローの高いペーストを採用。流動性を保ちながらも歯列から垂れ落ちることがないチキソトロピー性を持ち、欠損歯の多い症例でもらくに咬合面に載せることができます。操作余裕時間を過ぎた直後から一気に硬化速度が上がるのがソールバイトの特徴ですので、口腔内保持時間も短く、採得時のストレスもありません。硬化体に弾力性があるのでパリパリした感じがなく、模型上でも破折しにくく割れずに作業することが可能です。咬合面が滑らかなので、簡単にナイフでカット出来ます。寸法変化も収縮率-0.10%以下を維持します。



## テクニカルデータ (物性情報)

商品名	操作時間	口腔内保持時間	トータル時間	最終硬度	弾性ひずみ	寸法変化(48時間後)	硬化体の色
ソールバイトS	20秒	30秒	50秒	シヨアA90	1.1%以下	0～-0.10%	マットブルー
ソールバイトS スーパーファスト	15秒	20秒	35秒	シヨアA90	1.1%以下	0～-0.10%	青紫
ソールバイトS エクストラハード	20秒	30秒	50秒	シヨアA95	1.1%以下	0～-0.10%	パッションブルー

扱いやすさ、押し出しの軽さを優先される方に



- 30秒硬化!  
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90!  
「硬すぎず、軟らかすぎず」  
扱いやすい適度な硬度



ソールバイトS

PJ8110

3,900円

20秒硬化、トータル35秒!  
スピードも精確性も重視の方に



- 硬化が速くシャープ
- より精度の高い咬合採得が行える
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90!  
「硬すぎず、軟らかすぎず」  
扱いやすい適度な硬度



ソールバイトS  
スーパーファスト

PJ8180

4,200円

シヨア硬度が95と硬めのバイト材です。  
硬さを最優先される方に



- 30秒硬化!  
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA95!  
硬めでシャープ



ソールバイトS  
エクストラハード

PJ8190

5,000円

販売名:ソールバイトS 一般医療機器 届出番号:27B2X00268P00003

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口:06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター:〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号  
(製造販売業)

※商品は税別価格です。

担当販売店