

デグラニュレーションバー

Degranulation Kit

インプラント即時埋入時の抜歯窩搔爬を効率よく確実に行うティッシュダイヤモンドバーキットです。サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効果的に行うことができます。インプラントのみならず、ペリオサージェリー、エンドサージェリー、歯根端切除などにもご使用いただけます。



- 4つの径のティッシュダイヤモンドバーキットです。• 耐久性が高く、100ケース以上に使用可能です。
- 最大回転数2,500rpm。

デグラニュレーションキット



Degranulation Kit

商品コード	種類	入数	価格
GRKIT1	1mm/2.5mm/3mm/3.5mm 各1本 外科用サクシオン/洗浄ブラシ	1セット	72,000円

販売名：デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00054



パイルアップテクニックとデグラニュレーションキットの使用例の動画をご覧ください
※2分25秒あたりからデグラニュレーションキットを使用中の様子をご覧ください。



STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

先端径2.8mmの細いサクシオンチューブは術野を妨げません。
(取付部6.5mm) 専用洗浄ブラシ付

デグラニュレーションバー



Degranulation Kit

商品コード	種類	入数	価格
W-GR1D	バー 1mm		
W-GR2.5D	バー 2.5mm		
W-GR3D	バー 3mm	3本	50,000円
W-GR3.5D	バー 3.5mm		
SCTN-G1	外科用サクシオン(洗浄ブラシ付)	1本	18,000円

販売名：デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00054

デグラニュレーションキットと抜歯創用保護材 ～ 生体材料の使用を念頭に置いたソケットマネジメント ～

抜歯窩のスムーズな治癒を目指す時、課題になるのは適切な慢性感染性肉芽組織(以下、不良肉芽)の除去である。慢性炎症等で不良肉芽が骨壁に潜り込んでいるような症例は、不良肉芽の確実な除去が求められる反面、手技的な難易度は高くなる。鋭匙などに代表される従来の手用インスツルメントは、骨壁を搔爬することにより

- ① 肉芽組織が断裂し骨面に残存する場合がみられる ② 熟練の技術を要し、術者によってケアタイムが大きく異なる

などの状況が散見される。

デグラニュレーションキットは、回転するダイヤモンドバーの先端が、肉芽組織を「絡めとって引き抜く」ような動きになっている。手用インスツルメントを用いた抜歯窩内搔爬と比較すると、肉芽除去後の骨面は術者の技量に左右されることなく均一に良好な仕上がりで、なおかつ処置時間の短縮が期待できる。感染を惹起し狙った効果を得られない場合があることから、とりわけそれらを含む不良肉芽の徹底的な除去が求められる。デグラニュレーションキットを併用することで、術者に左右されず、抜歯創用保護材を適切に使用できる理想的な治癒環境を創造できる。

コラーゲン使用吸収局所止血材 テルプラグ (保険適用外)

■ 標準価格



Mサイズ 5個入

Sサイズ 10個入

SSサイズ 10個入

販売名：テルプラグ 医療機器の分類：クラスIV 高度管理医療機器
一般的名称：コラーゲン使用吸収局所止血材 医療機器承認番号：20900BZZ00646000

【製造販売元】オリンバステルモバイオマテリアル株式会社
東京都渋谷区笹塚1-50-1

【オリンバステルモバイオマテリアル歯科製品 お問い合わせ窓口】
0120-782-788 9:00~19:00(土・日・祝祭日を除く)

【オンラインショップ】URL:https://ec.biomaterial.co.jp/



Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店