

SOLEBITE^{Plus} series

Vinyl Polysiloxane
Bite Registration Material

Made in Japan



軽さ 見やすさ 垂れにくさ

トータルバランスを改良してリニューアル!

SOLEBITE^{Plus}



SOLEBITE^{Plus}
Super Fast



SOLEBITE^{Plus}
Extra Hard




premium⁺™
plus JAPAN

バイト材に必要な性能を見直し トータルバランスを改良しました。

当社バイト材の最大の特長は、操作性の良さとシャープな硬化反応。

操作時に影響する押し出しの軽さを維持するために、フローの高いペーストを採用。流動性を保ちながらも歯列から垂れ落ちることがないチキソトロピー性を持ち、欠損歯の多い症例でも楽に咬合面に載せることができます。操作余裕時間を過ぎた直後から一気に硬化速度が上がるのがソールバイトの特徴ですので、口腔内保持時間も短く、採得時のストレスもありません。硬化体に弾力性があるのでパリパリした感じがなく、模型上でも破折しにくく割れずに作業することが可能です。咬合面が滑らかなので、簡単にナイフでカット出来ます。寸法変化も収縮率-0.10%以下を維持します。

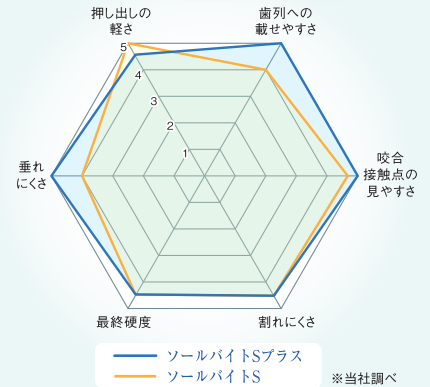

テクニカルデータ(物性情報)

商品名	操作時間	口腔内保持時間	トータル時間	最終硬度	弾性ひずみ	寸法変化(48時間後)	硬化体の色
ソールバイトSプラス	20秒	30秒	50秒	90 Shore A	1.1%以下	0～-0.10%	マットブルー
ソールバイトSプラス スーパーファスト	15秒	20秒	35秒	90 Shore A	1.1%以下	0～-0.10%	青紫
ソールバイトSプラス エクストラハード	20秒	30秒	50秒	95 Shore A	1.1%以下	0～-0.10%	パッションブルー

扱いやすさ、押し出しの軽さを
優先される方に



- 30秒硬化
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90
「硬すぎず、軟らかすぎず」
扱いやすい適度な硬度



SOLEBITE Plus

ソールバイトSプラス

扱いやすさ
軽さ

PJ8110SP 3,900円

20秒硬化、トータル35秒!
スピードも精確性も重視の方に



- 硬化が速くシャープ
- より精度の高い咬合採得が行える
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90
「硬すぎず、軟らかすぎず」
扱いやすい適度な硬度



SOLEBITE Plus
Super Fast

ソールバイトSプラス
スーパーファスト

スピード
精確性

PJ8180SP 4,200円

ショアA硬度が95と硬めのバイト材です。
硬さを最優先される方に



- 30秒硬化
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA95
硬めでシャープ



SOLEBITE Plus
Extra Hard

ソールバイトSプラス
エクストラハード

硬さ
最優先

PJ8190SP 5,000円

販売名：ソールバイトSプラス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00012

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店